

SCHEDA TECNICA REV02

Respiratore Facciale Monouso tipo FFP2

Modello: PHC+2

Descrizione

I respiratori facciali serie PHC+2 vengono utilizzati per proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono presenti polveri e/o particelle solide e liquide (non oil) volatili.

- Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla linguetta per setto nasale
- Elastici confortevoli che si indossano dietro le orecchie
- La tecnologia filtrante progettata da Puleo HC+™ minimizza la resistenza alla respirazione e fornisce una filtrazione efficace per prestazioni costanti e di alta qualità
- La forma progettata da Puleo HC+™ lo rende confortevole nel parlare
- Ripiegabile e quindi facile da riporre
- Trattamento di disinfezione ai raggi UV prima dell'imbustamento
- Confezionamento singolo per garantire il massimo livello di igiene prima dell'uso

Materiali

Corpo respiratore	4 strati in Tessuto-Non-Tessuto
Elastici	Gomma sintetica
Linguetta nasale	PE+acciaio zincato
Specifiche	Privo di lattice di gomma naturale
Peso	12 g
Imballo	1pz in busta-50 pz in scatola-10 scatole in imballo



Normativa

I respiratori filtranti soddisfano i requisiti della Normativa Europea EN149: 2001+A1:2009. Devono essere usati per proteggere le vie respiratorie di chi li indossa esclusivamente da polveri e particelle solide e liquide (non oil) volatili. Questi dispositivi sono prodotti in un impianto certificato secondo la ISO 9001:2015-4.

Marcatura

NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro)

D = Soddisfa i requisiti di resistenza all'intasamento

Certificazione

Questi prodotti soddisfano le disposizioni straordinarie dell'Art. 15 del Decreto Legge n. 18 del 2020 per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'Inail la funzione di **validazione straordinaria e in deroga** dei dispositivi di protezione individuale (dpi). La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre che dovranno assicurare la rispondenza alla suddetta Normativa Europea EN149: 2001+A1:2009.

Applicazione e Limite d'Impiego

Questi prodotti sono utilizzabili nelle situazioni e condizioni ambientali tali che la concentrazione delle sostanze contaminanti non superi il valore limite di 12 x TVL

*TVL: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia)

PULEO S.p.A.

SS 115 Km 21
Fraz. Bosco, 479
91025 Marsala / Italy
info@puleohealthcare.com

T +39 0923 968284
F +39 0923 968920
Service +39 0923 1961289

Cod.Fisc./P.IVA 01233360815
R.E.A. N. 75992
Capitale Sociale € 1.500.000
www.puleohealthcare.com

Hanno una durata a magazzino di 5 anni. Prima dell'uso controllare che il prodotto sia ancora all'interno del periodo di validità dichiarato.

Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito ad una temperatura compresa fra -20°C e +25°C con un'umidità relativa <80%.

Caratteristiche di Filtrazione

Classificazione	Penetrazione del materiale filtrante
	Test Aerosol con NaCl - olio di Paraffina max. 95 l/min
FFP2	94%**

** Il materiale filtrante deve avere una penetrazione al test aerosol eseguito con NaCl - olio di Paraffina a max. 95 l/min non superiore al 6%.


Istruzioni per L'Uso

- Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale usa e getta; prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore.
- Si consiglia di verificare l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare.
- Sugeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a fonti nocive e/o pericolose per la salute dell'individuo.

Istruzioni per L'Indossamento

Istruzioni per l'uso di mascherine chirurgiche e respiratori filtranti

Prima di indossare la mascherina è consigliabile lavarsi le mani

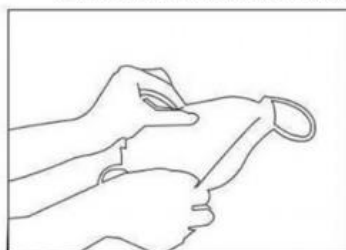

Aprire la mascherina.



Indossare la mascherina appoggiandola prima sul naso



Agganciare gli elastici dietro alle orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni



Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile anche sulle guance e sotto il mento

Rimuovere la mascherina evitando il contatto con la parte interna.

Per chiarimenti sulla scelta del dispositivo più idoneo e sulla formazione, non esitate a contattarci. Offriamo una vasta gamma di informazioni e materiale di supporto.

Al fine di migliorarne la qualità e la produzione, la Puleo S.p.A. si riserva il diritto di introdurre le eventuali modifiche necessarie al prodotto in qualsiasi occasione e senza alcun obbligo di preavviso.

PULEO S.p.A.

SS 115 Km 21
Fraz. Bosco, 479
91025 Marsala / Italy
info@puleohealthcare.com

T +39 0923 968284
F +39 0923 968920
Service +39 0923 1961289

Cod.Fisc./P.IVA 01233360815
R.E.A. N. 75992
Capitale Sociale € 1.500.000
www.puleohealthcare.com